



## Инструкция по применению жидкости для замешивания паковочных масс UNISOL-1

**Unisol 1** – жидкость для замешивания прецизионной паковочной массы для бюгельных протезов, нагреваемой быстрым и традиционным способом.

Жидкость **не является устойчивой к низким температурам**. Температура хранения и транспортировки: от +5° до +35°С.

Перед замешиванием сполосните чистый стакан водой и протрите. Грязные или сухие стаканы поглощают влагу из паковочной массы.

Рабочее время            при 20°С – примерно 3,5 мин.  
                                  при 23°С – примерно 3,0 мин.

Насыпьте порошок, залейте жидкостью, перемешайте шпателем не менее **15 секунд**. Затем замешивайте в течение 60 секунд, по возможности в вакуумном смесителе. Замешивание без прибора проводить в течение **2 минут** на вибростолике.

### Дублирование и паковка

Соотношение смешивания: 100 г порошка : 20 мл жидкости

	Паковочная масса для бюгельных протезов	Жидкость Unisol 1	Дистиллированная вода	Жидкость для замешивания (Unisol 1 + дист. вода)	
				Количество	концентрация
Для 2-ух дубликат-моделей	1 x 400 г	56 мл	24 мл	80 мл	70%
Для 1 опоки	1 x 400 г	56 мл	24 мл	80 мл	70%